





Snadná údržba

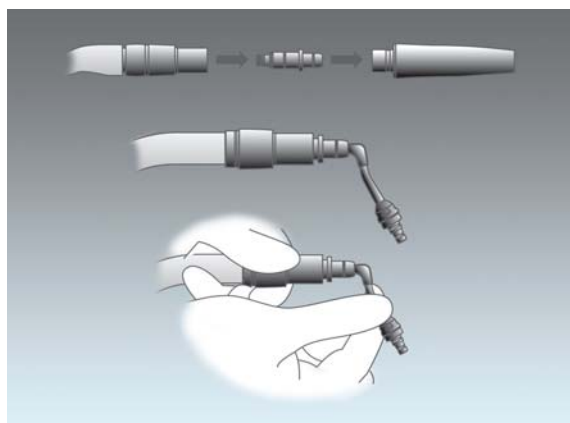

Se speciální profukovací tryskou lze čištění provádět velice snadno. Preventivní čištění předchází případnému ucpání. K dispozici jsou profukovací trysky na všechny typy rychlospojek i na hadice Midwest a Borden. Balení obsahuje i kartáček a čistící dráty.

Doporučená pozice trysky

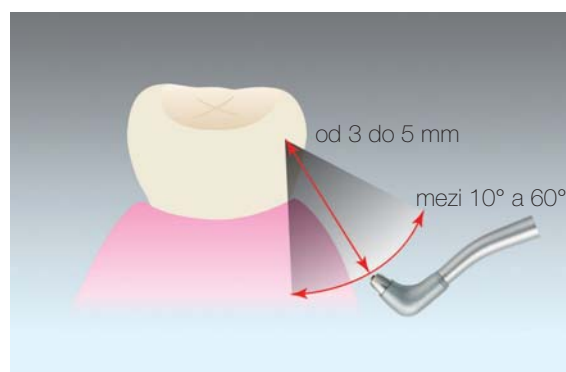

Efektivnější čištění dosáhnete nastavením sklonu trysky v úhlu mezi 10° a 60°, ve vzdálenosti 3-5mm od povrchu zubu. Tento úhel se liší od ostatních pískovačů na trhu. Valivý efekt a absorpce sférických částic **FLASH pearl** je optimální při nastavení trysky právě v tomto úhlu. Proud spreje se aplikuje od okružálního povrchu k cervikálnímu okraji zubu.

Náhradní díly a příslušenství

PMN-HP násadec s tryskou 60°



Obj. kód
T797-010

Víčko zásobníku prášku (neo)



Obj. kód
T798-133

FLASH pearl 100x15g



Obj. kód
Y900-693

FLASH pearl 4x300g sypaný



Obj. kód
Y900-698

PTL O-Ring set 5ks



Obj. kód
Y900-580

PM O-Ring set 3ks



Obj. kód
Y900-054

O-kroužek trysky přední



Obj. kód
0312039 070

O-kroužek trysky zadní



Obj. kód
0312029 070

Tryska 60° (neo)



Obj. kód
T797-012

Tryska 80° (neo)



Obj. kód
T797-013

Klíček trysky (neo)



Obj. kód
T797-601

Profukovací tryska PTL (neo)



Obj. kód
T798-094

Těsnění víčka (neo)




Obj. kód
T798-135

Oil na o-kroužky



Obj. kód
Z016-112

Čistící drát (neo)

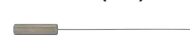

Obj. kód
T798-090

Čistící jehla na trysku (dlouhá)



Obj. kód
T798-095

Čistící jehla na trysku (krátká)



Obj. kód
T798-091

Čistící kartáček (neo)



Obj. kód
T798-092

Prophy-Mate neo Specifikace

■ Násadec s tryskou 80°

Délka: 173,9mm Hmotnost: 134,9g

■ Násadec s tryskou 60°

Délka: 171,4mm Hmotnost: 134,8g

LIEHMANN CZ, s.r.o.
Černomořská 3, 101 00 Praha 10, Česká republika
Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716
e-mail: liehmann@volny.cz

NSK EUROPE GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn,
Germany, Tel.: +49/6196/77606-0, fax: +49/6169/77606-29


Váš prodejce NSK:

Expert
Perfection®



www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

Změny vyhrazeny.

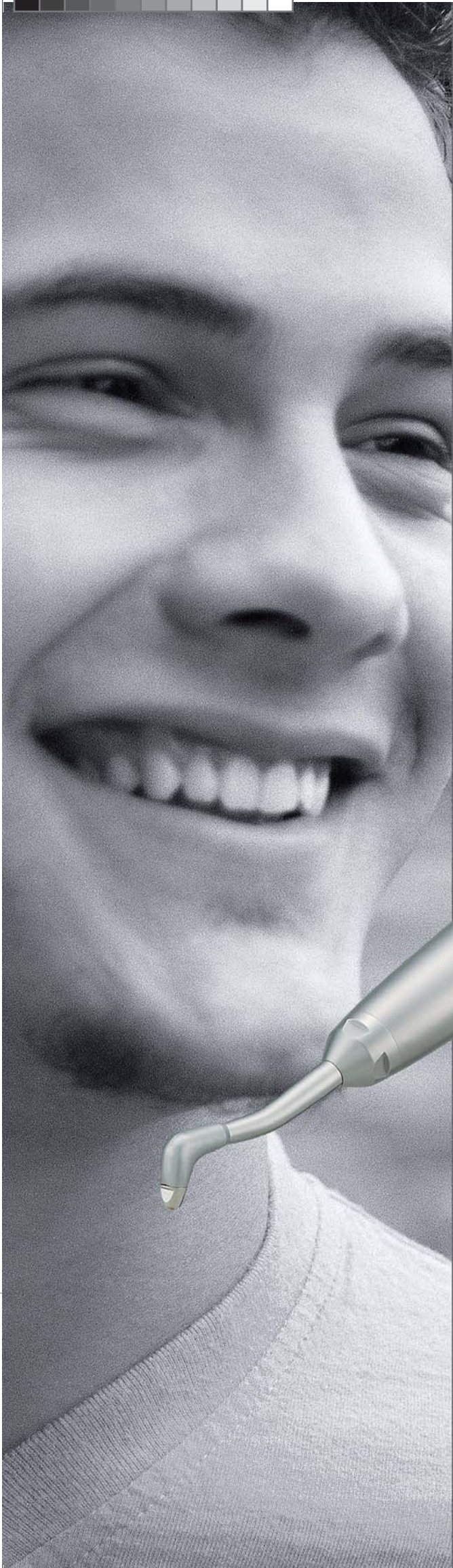

NSK

Pro perfektní
úsměv



Prophy-Mate
neo



Vzduchový profylaktický systém

Vylepšený Prophy-Mate neo dosahuje ideálním spojením tvaru a funkčnosti lepších výsledků. Vynikající vyváženost, nižší hmotnost a kompaktní zásobník prášku umožňují komfortní držení přístroje. Originální spojovací prvky násadce dovolují lehké otáčení o 360° i při vysokém tlaku vzduchu. Snadná manipulace zkracuje čas pro odstraňování zubního plaku a skvrn. K dispozici jsou trysky zahnuté o 60° a 80°.

Použití

- Odstraňování zubního plaku a skvrn.
- Čištění.
- Leptání skloviny, zuboviny a porcelánu před bondováním.
- Příprava pro pečetění fisur.

Přednosti

- Velká úspora času.
- Snadná manipulace.
- Jednoduchá údržba.
- Rychlé připojení na turbínovou spojku.
- Možnost volby trysky se sklonem 60° a 80°.




Prophy-Mate neo šedý

Charakteristika



Ergonomický design

Odlehčený, kompaktní model s ideálním vyvážením umožňuje snadnou manipulaci zabraňující únavě rukou či zápěstí a tím napomáhá důkladnému ošetření.

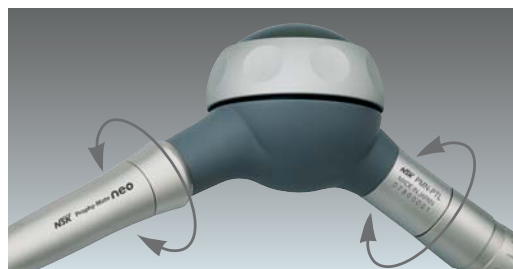


Hladké a snadné otáčení o 360°

Spojovací prvky dovolují otáčení o 360°, tím usnadňují manipulaci, reagují pružně i na minimální pohyby prstů a dovolují snadné a přesné nastavení úhlu koncové trysky.



Jednoduché jedno-dotykové připojení

Nový Prophy-Mate neo je konstruován tak, aby připojení na rychlospojku NSK, jakož i na spojky ostatních výrobců turbín, bylo jednoduché a dalo se provést jedním dotykem.

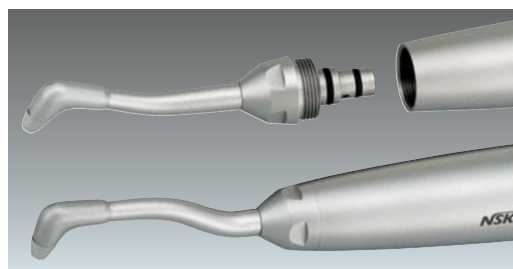


Snadno snímatelné koncové trysky

Volitelné trysky s úhlem zahnutí 60° a 80° umocňují čistící schopnost. Trysky s úhlem zahnutí 60° jsou vhodné pro moláry a okluzální plochy, s úhlem zahnutí 80° jsou určeny především pro přední zuby.



Zvýšená čistící síla

Originální zdvojená tryska NSK zvyšuje čistící výkon prášku. Díky zdvojené trysce se zřetelně zkracuje doba čištění a tím i celková doba ošetření.

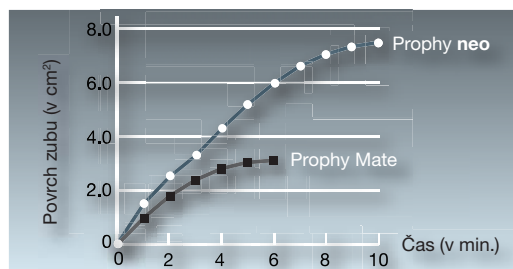

Razantní síla

Díky výkonným zdvojeným tryskám dodává Prophy-Mate neo stabilní čistící sílu. Razantní čistící síla umožňuje efektivní ošetření.

Prophy-Mate neo – ucelený systém

* přímé připojení na uvedenou spojku

Typ spoje	NSK	KaVo®	Sirona®	W&H®	Bien-Air®	M4	Přímé připojení na 4-děrovou hadici Midwest	B2	Přímé připojení na 2-děrovou hadici Borden
Model	PMNG-PTL-P	PMNG-KV-P	PMNG-SR-P	PMNG-WH-P	PMNG-BA-P	PMNG-M4-P		PMNG-B2-P	
Obj. kód	Y135-029	Y135-030	Y135-031	Y135-032	Y135-033	Y135-034		Y135-035	
	NSK PTL-CL-4HV-T		KaVo® MULTIRex LLX®	Sirona® Schnellkupplung	W&H® Roto Quick®	Bien-Air® Unifix®			

Kompletní set obsahuje: • Prophy-Mate neo • Obě trysky 60° a 80° • Příslušenství pro údržbu • 5x15g prášku Flash pearl • Náhradní víčko zásobníku • Klíček pro výměnu trysek

